



## 2. Advertencias

El sube-escaleras debe ser utilizado respetando las siguientes prescripciones:

- Conductor de edad superior a 14 años.
- Es obligatorio que el pasajero mantenga una posición erecta, con los hombros y la cabeza apoyados en el respaldo.
- No utilizar el sube-escaleras como medio para transportar cosas diferentes.
- En ningún caso, la persona transportada debe sostener objetos o pesos varios.
- El conductor siempre debe colocarse adelante con respecto al medio de transporte: por lo tanto, no utilizar el sube-escaleras procediendo en las escaleras de manera inversa (detrás de la silla de ruedas).

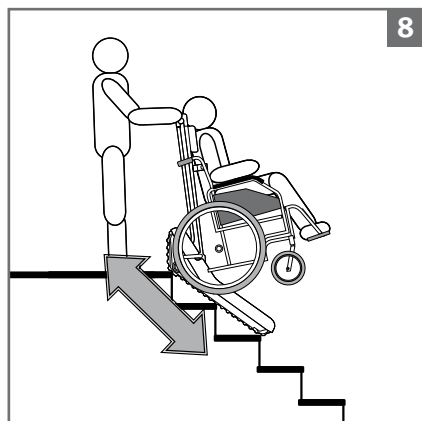


SI

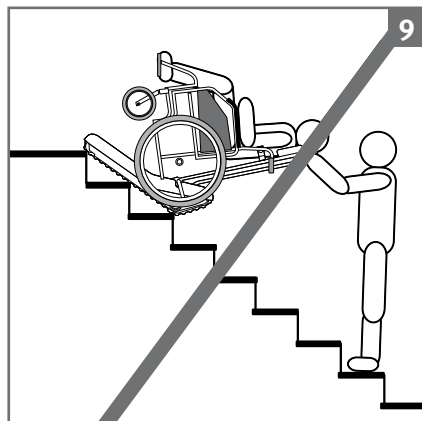


NO


- No utilizar el sube-escaleras en escalones resbaladizos, mojados, dañados, revestidos con moqueta o tratados con ceras.
- No utilizar el sube-escaleras en escaleras trapezoidales o caracol.
- No utilizar el sube-escaleras en superficies irregulares.

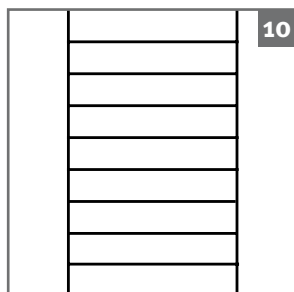

SI

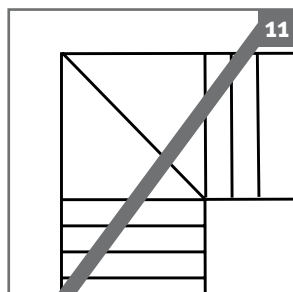

NO

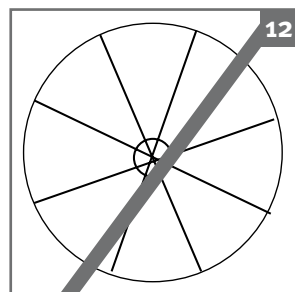

NO